

# 経鼻チューブ固定用テープ「抜いちゃイカン ライト」(MM41)取扱説明書

## Step1: 接着前に

・接着する皮膚の皮脂や汗を拭きとってください。

水分・石鹼を湿らせたガーゼで拭き取り、皮膚表面を十分に乾燥させてください。この時、洗浄にアルコール等の揮発性のあるものは絶対に使用しないでください。

## Step2: 固定テープの貼り付け・固定

経鼻チューブ挿入後に固定テープを貼り付けます。  
説明は右頬接着です。左頬も同等に使用できます。  
また、右鼻孔に挿入時も右頬で使用できます。



### 1. 【鼻下用シート】


鼻下シートの皮膚接着面を剥がし、くぼみ部を鼻横に合わせ  
胃管をシート上に出し、剥がして貼る



### 2. 【鼻下用シート】

鼻下シートの上面を剥がし、胃管の上から貼る

コツ: 胃管を鼻腔から真直ぐ出し鼻腔に  
当たらないようにして横向きに貼る

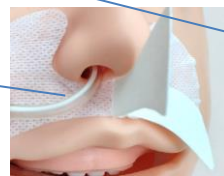

### 3. 【Y字型シート】


Y字型シートを剥がし、胃管の上から貼る

Y字型シートの切れ目から胃管を出します

コツ: 鼻横から耳下に向けて貼る


顔が小さくテープが耳に係る場合は

切り込みを入れ、一部をカットしてください

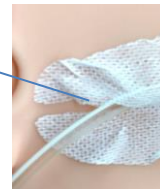

### 4. 【U字型シート】

U字型シートを剥がし、胃管を表に出して貼る

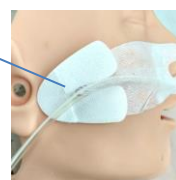

### Step3: 取り外し・交換

2日から3日程度の連続使用が可能です。(使用環境、接着状況により短くなることがあります)  
剥がす時は、ガーゼ等にぬるま湯または生理食塩水を染み込ませて優しく皮膚を拭きながら剥がしてください。剥がすときに強い刺激を与えると、皮膚トラブルになることがあります。

#### 【注意・警告事項】

- ◆ 本品は医療機器との併用による補助的な製品(雑品)であり生命維持・治療・診断を目的とした医療機器ではありません。
- ◆ 本品は医療機器との併用による補助的なテープ製品(雑品)でありチューブ固定、チューブ保護の確実性を保証するものではありません。
- ◆ ご使用前に併用する医療機器間の接続、性能等に問題ないか確認してください。
- ◆ ご使用前に製品の破損がないか必ず確認してください。
- ◆ 本品の使用は定期的に新しいものと交換してください。また、皮膚状態、湿度、体位、使用機器等の使用環境により早期交換が必要になる場合があります。定期観察で事前に“はがれ”等の異常を予見し、早期交換を行ってください。
- ◆ 異常が早期に発見できるように常に観察してください。特に体動、分泌物の多い場合は注意深く観察してください。
- ◆ 固定が不十分と思われる場合には使用を中止してください。
- ◆ 肌に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止してください。
- ◆ 本品を安全にご使用頂くために、ご使用に際してのプロトコル(院内の使用手順・基準)を作成してください。
- ◆ 経鼻チューブの挿入およびチューブ交換、テープ交換に関しては院内のプロトコルに従って下さい。

#### 【保管と使用期限】

- 使用期限は製造から<2年>です。
- 保管は一般的な病院内の室温保存で直射日光が当たらない場所。夏場や冬場の外気温に近くなるような保管場所はお避け下さい。



装着方法動画



髙野メディカルプロジェクト

静岡市葵区大鋸町1番地の12

TEL: 054-252-1141